



Casete de prueba rápida de anticuerpos contra el anaplasma canino

(Sangre total/Suero/Plasma)

Ficha Técnica

REF VIANA-402

Español

USO PREVISTO

El casete de prueba rápida de anticuerpos contra el anaplasma canino (Ab) (Sangre total/Suero/Plasma) es un ensayo de flujo lateral inmunocromatográfico tipo sándwich para la detección cualitativa de anticuerpos contra el anaplasma canino (Ab) en sangre total, suero o plasma canino.

PRINCIPIO

El casete de prueba rápida de anticuerpos contra el anaplasma canino se basa en un ensayo de flujo lateral inmunocromatográfico. El casete de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una zona T (prueba) invisible y una zona C (control). Cuando se aplica la muestra en el pozo de la muestra en el casete, el líquido fluirá lateralmente en la superficie de la tira de prueba. Si hay suficientes anticuerpos de Anaplasma canino en la muestra, aparecerá una línea T visible. La línea C debe aparecer siempre después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. De este modo, el casete puede indicar con precisión la presencia de anticuerpos contra el Anaplasma canino en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Conserve tal y como se presenta en la bolsa sellada, a temperatura ambiente o refrigerada (2-30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la bolsa sellada. El casete de la prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELE**. No utilice más allá de la fecha de caducidad.

PRECAUCIONES

- No utilice después de la fecha de caducidad.
- Manipule todos los especímenes como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los riesgos microbiológicos a lo largo de las pruebas y siga los

procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

- Utilice guantes desechables y protección para los ojos cuando analice las muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No retire el casete de prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de su uso.
- No reutilice el kit de pruebas.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y productos.

MATERIALES

Materiales suministrados

- Casete de prueba
- Gotero
- Buffer
- Ficha técnica

Materiales requeridos pero no suministrados

- Temporizador
- Contenedores de muestras
- Centrífuga


INSTRUCCIONES DE USO

Deje que el casete de prueba, la muestra y el Buffer se equilibren a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar el ensayo.

- Recolecte las muestras de sangre entera, suero o plasma fresco de los caninos y asegúrese de que las muestras no pueden estar turbias o precipitadas. Utilice únicamente muestras claras y no hemolizadas. No deje las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8 °C durante un máximo de 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero y plasma deben conservarse a menos de -20 °C.
- Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada.
- Mantenga el gotero en posición vertical y transfiera **2 gotas de muestra** (aproximadamente 20 µL) e inmediatamente añada 2

gotas de Buffer (aproximadamente 80 µL) en el pozo de la muestra (S), luego ponga en marcha el temporizador.

- Lea el resultado en 10 minutos. No interprete los resultados después de 15 minutos.

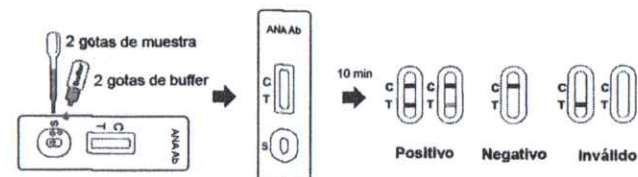

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: La presencia de la línea C y la línea T, sin importar que la línea T sea clara o difusa.

Negativo: Sólo aparece la línea C clara.

Inválido: No aparece ninguna línea de color en la zona C, independientemente de que aparezca la línea T.

LIMITACIONES

El casete de prueba rápida de anticuerpos contra el anaplasma canino es sólo para uso de diagnóstico veterinario. Todos los resultados deben ser considerados con otra información clínica disponible del veterinario. Para obtener un resultado preciso, se recomienda aplicar otro método como la PCR o la prueba de aislamiento de patógenos para la determinación final en la práctica.

Índice de símbolos

	Consulte las instrucciones de uso		Pruebas por kit		No reutilizar
	Almacenar a 2-30 °C		Usar hasta		# de Catálogo
	No usar si el envase está dañado		Numero de Lote		Fabricante

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhe Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Número: V145098000

Fecha de revisión: 2023-06-16