



Casete de prueba rápida de anticuerpos de Babesia gibsoni
(Sangre Total/Suero/Plasma)

Inserto

REF VIBG-402

Español

USO PREVISTO

Casete de prueba rápida de anticuerpos de Babesia gibsoni (sangre total/suero/Plasma) es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de Anticuerpo B.gibsoni en sangre total, suero o plasma canino.

Sólo para uso veterinario.

PRINCIPIO

El casete de prueba rápida de anticuerpos de Babesia gibsoni se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral. El casete de prueba tiene una ventana de prueba con una zona T (prueba) invisible y una zona C (control). Cuando la muestra se aplica en el pocillo de muestra del casete, el líquido fluirá lateralmente sobre la superficie de la tira reactiva. Si hay suficientes anticuerpos contra B.gibsoni en la muestra, aparecerá una línea T visible. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. De esta manera, el casete puede indicar con precisión la presencia de anticuerpos contra B. gibsoni en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar tal como está empaquetado en la bolsa sellada, ya sea a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 °C). La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El casete de prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR.** No lo use más allá de la fecha de vencimiento.

PRECAUCIONES

- No utilizar después de la fecha de vencimiento.
- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Utilice guantes desechables y protección para los ojos cuando se analicen las muestras.

- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No retire el casete de prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de su uso.
- No reutilice el kit de prueba.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materiales proporcionados

- Casets de prueba
- Goteros
- Tampón
- Inserto


Materiales necesarios pero no proporcionados

- Temporizador
- Recipientes para muestras
- Centrífuga

INSTRUCCIONES DE USO

Deje que el casete de prueba, la muestra y el tampón se equilibren a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar la prueba.

- Recoja sangre completa fresca del canino o separe el suero o plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. Utilice únicamente muestras claras y no hemolizadas. No deje las muestras a temperatura ambiente por periodos prolongados. Las muestras de suero y plasma se pueden almacenar a 2-8 °C hasta por 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero y plasma deben mantenerse por debajo de -20 °C. No congele muestras de sangre entera.
- Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y nivelada.
- Sostenga el gotero verticalmente y transfiera **1 gota de muestra** (aproximadamente 10 µL) e inmediatamente agregue **2 gotas de tampón** (aproximadamente 80 µL) al pocillo de la muestra (S), luego inicie el cronómetro. Vea la ilustración a continuación.
- Leer el resultado a los 10 minutos.** No interprete los resultados después de 15 minutos.

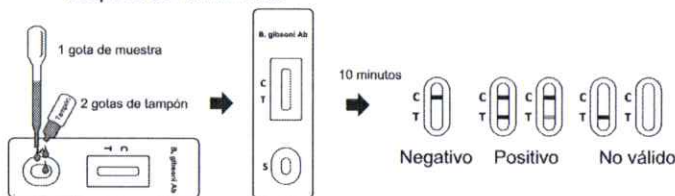

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: la presencia tanto de la línea C como de la línea T, sin importar si la línea T es clara o vaga.

Negativo: solo aparece la línea C clara.

No válido: no aparece ninguna línea de color en la zona C, sin importar si aparece la línea T.

LIMITACIÓN

El casete de prueba rápida de anticuerpos de Babesia gibsoni solo para uso de diagnóstico veterinario. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para obtener un resultado preciso, se sugiere aplicar otro método como PCR o Elisa para la determinación final en la práctica.

Índice de símbolos

	Consultar instrucciones de uso o consultar instrucciones de uso electrónicas		Contiene suficiente para <n> pruebas		Límite de temperatura
	No utilizar si el paquete está dañado y consultar las instrucciones de uso		Código de lote		Catálogo número
	Fabricante		Utilizar por fecha		No reutilizar

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Número: V145142400

Fecha de revisión: 2024-04-08