



Prueba Rápida de Ehrlichia Canis Anticuerpo en Casete (Sangre Entera/Suero/Plasma)

Ficha Técnica

REF VIEH-402

Español

USO PREVISTO

Prueba Rápida de Ehrlichia Canis Anticuerpo en Casete (Sangre Entera/Suero/Plasma) es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral indirecto para la detección cualitativa del anticuerpo Ehrlichia Canis (Ehrli Ab) en Sangre entera o suero y plasma de canino.

PRINCIPIO

Prueba Rápida de Ehrlichia Canis Anticuerpo en Casete Se basa en el ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral. El casete de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una zona invisible T (prueba) y una zona C (control). Cuando la muestra se aplica en el pozo de la muestra en el casete, el líquido fluirá lateralmente sobre la superficie de la tira de prueba. Si hay suficientes anticuerpos contra Ehrlichia Canis en la muestra, aparecerá una línea T visible. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. De esta manera, el casete puede indicar con precisión la presencia de anticuerpos contra Ehrlichia Canis en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacénelo como se incluye en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 °C). El casete de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. El casete de prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR**. No usar más allá de la fecha de caducidad.

PRECAUCIONES

- No utilizar después de la fecha de caducidad. No reutilice el kit de prueba.
- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos a lo largo de las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se estén analizando muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar adversamente los resultados.

- No retire la bolsa el casete de prueba hasta usarlo.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materials Provided

- Prueba de la casetes
- Goteros
- Buffer
- Ficha Técnica


Materiales requeridos pero no proporcionados

- Tiemporizador
- Contenedores de muestras
- Centrifuge

INSTRUCCIONES DE USO

Permita que el casete de prueba, la muestra el buffer y/o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de la prueba.

- Recoja muestras sangre entera, suero o plasma de canino y asegúrese de que las muestras no puedan ser turbias o precipitadas. Utilice únicamente muestras claras, no hemolizadas. No deje las muestras a temperatura ambiente durante periodos prolongados. Las muestras de suero y plasma se pueden almacenar a 2-8 °C por hasta 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero y plasma deben mantenerse por debajo de -20 °C. No congele muestras de sangre entera.
- Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada.
- Sostenga el gotero verticalmente y transfiera **1 gota de muestra** (aproximadamente 10 µL) e inmediatamente agregue **2 gotas de buffer** (aproximadamente 80 µL) en el pozo de la muestra (S), luego inicie el temporizador. Vea la ilustración de abajo.
- Lea el **resultado en 10 minutos**. No interpretar los resultados después de 15 minutos.

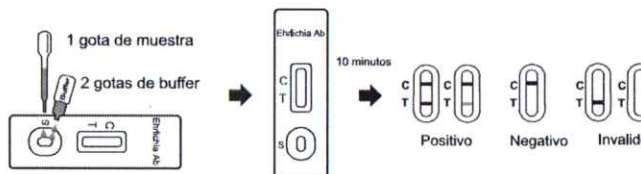

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: La presencia tanto de la línea C como de la línea T, independientemente de que la línea T sea fuerte o débil.

Negativo: Sólo aparece la línea C clara.

Inválido: No aparece ninguna línea de color en la región C,

independientemente de la apariencia de la línea T.

LIMITACIONES

El casete rápido de la prueba del anticuerpo de Ehrlichia Canis está para el uso veterinario del diagnóstico solamente. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para obtener un resultado preciso, se sugiere aplicar otro método como la prueba de aislamiento de patógenos o PCR para la determinación final en la práctica.

Índice de símbolos

	Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas		Contiene suficiente para <n> pruebas		Límite de temperatura
	No lo utilice si el paquete está dañado y consulte las instrucciones de uso		Código de lote		Catálogo Número
	Fabricante		Fecha de caducidad		No reutilizar

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhal Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Número: V145072700

Fecha de revisión: 2023-07-26