



**Casete de prueba rápida del antígeno
del virus de la rabia
(Saliva)
Inserto**

REF VIRBV-802 | Español

USO PREVISTO

El casete de prueba rápida del antígeno del virus de la rabia (saliva) es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa del antígeno del virus de la rabia en la saliva canina.

Sólo para uso veterinario.

PRINCIPIO

El casete de prueba rápida del antígeno del virus de la rabia (Saliva) se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral. El casete de prueba tiene una ventana de prueba con una zona T (prueba) invisible y una zona C (control). Cuando la muestra se aplica en el pocillo de muestra del casete de prueba, el líquido fluirá lateralmente sobre la superficie de la tira reactiva. Si hay suficientes antígenos del virus de la rabia en la muestra, aparecerá una línea T visible. Si la muestra no contiene antígenos del virus de la rabia, no aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba que indica un resultado negativo. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. De esta manera, la prueba puede indicar con precisión la presencia del antígeno del virus de la rabia en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Guárdelo tal como está empaquetado en la bolsa sellada, ya sea a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 °C). El activo de prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El activo de prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR.** No guarde el kit de prueba bajo la luz solar directa.

PRECAUCIONES

- No utilizar después de la fecha de caducidad. No reutilice el kit de prueba.
- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra riesgos microbiológicos durante las pruebas y siga los

procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

- Utilice guantes desechables y protección para los ojos cuando se analicen las muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No retire el casete de prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de su uso.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materiales proporcionados

- Casets de prueba
- Goteros
- Hisopos
- Tubos de plástico con buffer
- Inserto


Materiales necesarios pero no proporcionados

- Recipientes para recogida de muestras
- Centrífuga
- Temporizador

INSTRUCCIONES DE USO

Deje que el casete de prueba, la muestra y el buffer se equilibren a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar la prueba.

- Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio y utilícelo lo antes posible. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se realiza dentro de una hora.
Recoja la saliva del perro con el hisopo proporcionado. Moje el hisopo lo suficiente. Inserte el hisopo húmedo en el tubo provisto con buffer. Agítelo para asegurar una buena extracción de la muestra.
- Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. Sostenga el gotero verticalmente y **transfiera 3 gotas de la muestra extraída** (aproximadamente 120 µL) al pocillo de muestra (S) del casete de prueba, luego inicie el cronómetro. Vea la ilustración a continuación.
- Lea los resultados en **10 minutos**. No interprete los resultados después de 15 minutos.

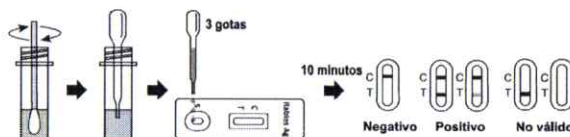

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: La presencia tanto de la línea C como de la línea T, independientemente de si la línea T es fuerte o débil.

Negativo: Solo aparece la línea C clara.

No válido: No aparece ninguna línea de color en la zona C, independientemente de la apariencia de la línea T.

LIMITACION

El casete de prueba rápida del antígeno del virus de la rabia es solo para uso de diagnóstico veterinario. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario.

Índice de símbolos

	Consultar instrucciones de uso o consultar instrucciones de uso electrónicas		Contiene suficiente para <n> pruebas		Límite de temperatura
	Fabricante		Código de lote		Catálogo número
	No utilizar si el paquete está dañado y consultar las instrucciones de uso.		Utilizar por fecha		No reutilizar

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Número: V145142600

Fecha de revisión: 2024-07-12