

Rabia Virus Antígeno (RBV Ag) Rapid Test Kit



USO VETERINARIO

NOMBRE

VG-004: Rabia Virus Antígeno (RBV Ag) Rapid Test Kit VETGER

PRINCIPIO

El kit de prueba de antígeno del virus de la rabia utiliza el principio de inmunocromatografía con oro coloidal. Está diseñado para la detección cualitativa del antígeno del virus de la rabia en sangre completa, suero y plasma de perros/gatos. La tira de prueba tiene una línea de prueba "T" y una línea de control "C" en su superficie. Cuando hay una cantidad suficiente de antígeno del virus de la rabia en la muestra, la línea de prueba "T" mostrará una banda de color púrpura-rojo. Una exhibición normal de la línea de control "C" indica una prueba válida.

MATERIALES PROVISTOS

- Pruebas Rápidas: 20 pouches
- Buffer individual: 20 unidades
- Hisopo de colección: 20 unidades
- Inserto: 1 unidad

MATERIALES NO PROVISTOS

- CRONÓMETRO

ALMACENAMIENTO


- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa (2~30°C).
- Vida útil de 24 meses (ver el envase para más detalles).

RECOLECCIÓN DE MUESTRA

- Muestra para pruebas: saliva canina/felina. Las muestras deben ser analizadas el mismo día de la recolección.
- Si la prueba no se puede realizar el mismo día, las muestras deben ser refrigeradas.
- Si han pasado más de 24 horas, las muestras deben ser congeladas.

PROCEDIMIENTO DEL TEST

- Antes de usar cualquier reactivo, deben dejarse alcanzar la temperatura ambiente (15-30°C).
- Rompa el papel de aluminio del tubo de recolección de buffer de muestra y colóquelo en la estación de trabajo.
- Utilice un hisopo para recolectar una cantidad apropiada de muestra de saliva de canino/felino e insértela en el tubo de recolección que contiene la solución tampón de muestra.
- Gira el hisopo de algodón durante unos 10 segundos para mezclar completamente la muestra con la solución de dilución de la muestra.
- Aprieta las paredes del tubo de recolección con tus dedos para extraer la mayor cantidad de solución posible del hisopo de algodón, luego retira el hisopo y cubre el gotero.
- Déjalo reposar durante 2 minutos.
- Retire la tarjeta de prueba y colóquela sobre una superficie plana.
- Agregue lentamente 3 gotas de la mezcla de muestra en el orificio de muestra.
- Interprete los resultados dentro de 10-15 minutos.
- Los resultados leídos después de 15 minutos se consideran inválidos.

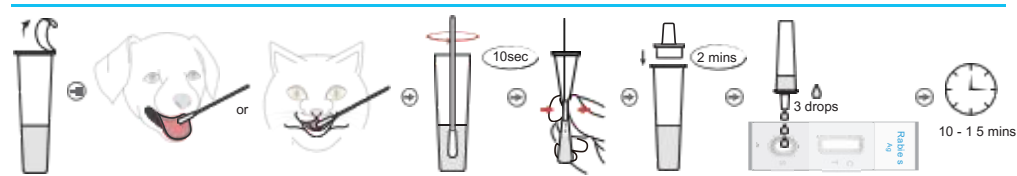

LECTURA DE RESULTADOS

Positivo:


Indica la posible presencia de antígeno RBV en la muestra. Recomendamos una prueba extra para confirmación adicional, además de dar parte al departamento de ZOONOSIS local.

Negativo:

Sugiere que el antígeno RBV puede no estar presente en la muestra. Recomendamos pruebas periódicas (2 más con intervalos de 2 días).

Inválido:

Este resultado se debe a un funcionamiento incorrecto u otros factores. Aconsejamos repetir la prueba de acuerdo a las instrucciones. Si el problema persiste, interrumpa el uso de este lote y contacte a su proveedor local de inmediato.

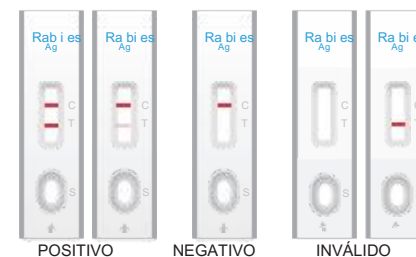

PRECAUCIONES

- Este producto está destinado para su uso únicamente con perros y gatos y no debe ser utilizado con otros animales.
- Este producto es de un solo uso y no debe reutilizarse.
- Antes de la operación, por favor lea las instrucciones cuidadosamente y sigalas en consecuencia.
- Asegúrese de la integridad del embalaje antes de abrir el producto y úselo dentro de su fecha de caducidad indicada.
- Está prohibido mezclar tarjetas de prueba y soluciones de muestra de diferentes lotes.
- Manéjele todos los muestras con posibles riesgos infecciosos según lo requerido.
- Deseche los residuos médicos de un solo uso de acuerdo con las regulaciones locales.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA

- Los resultados de este producto son solo para referencia y no deben ser la única base para el diagnóstico y tratamiento.
- Los síntomas clínicos y otras pruebas deben considerarse junto con los resultados.
- Este producto está destinado únicamente a pruebas cualitativas y no proporciona información sobre los niveles de anticuerpos en la muestra.
- Debido a limitaciones en la sensibilidad, pueden ocurrir resultados negativos cuando la concentración de anticuerpos en la muestra está por debajo de la sensibilidad de detección del producto.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

